

マスクの装着方法

1~4の順に沿ってマスクを正しく付けてください。
フィルターは1日を目処に交換することをお勧めしています。

1

付属のフィルターを1枚取り出し、内側のポケットを広げ、ロゴの無い面が口元側になるようにセットします。



2

口元を抑え、ずれないようにマスクを装着します。片耳ずつ紐を掛けると装着しやすいです。



3

お好みでつけ方をお選びいただけます。

style 1

肌触り重視

鼻とあご部分のカバーを引出し、顔にフィットするように調整します。



style 2

通気性やフィット感重視

内側のポケット部分の生地をあごの下まで引き出して、あごを覆うように装着します。鼻部分のカバーも引き出し、顔にフィットするように調整します。



4

ずれがないか確認をして装着完了です。



動画でも装着方法をご覧ください。

Q nunotect